



Monitor de Apnea FC-Life
Tecnología Superior para el monitoreo veterinario





RENDIMIENTO AVANZADO

El FC-Life diseñado para ver y oír el ritmo respiratorio durante la cirugía, con display digital que nos pone en aviso de problemas inminentes mediante la alarma sonora que se activa con la ausencia de movimientos respiratorios...

Debido a la falta de monitoreo, la mayoría de las emergencias durante la anestesia pueden atribuirse al error humano.

Con el uso del monitor FC-Life habrá alerta, no solo para evitar muertes accidentales, sino también para controlar mejor el uso de anestésicos.



CARACTERÍSTICAS:

OPERACIÓN SIMPLE: Simplemente conecte el monitor de apnea al tubo endotraqueal y anestesia, y todo estará listo para usar.

SENSIBLE: Una vez que el paciente deja de respirar durante 30 segundos, sonará una alarma.

INICIO AUTOMÁTICO: Después de conectarse con el animal, se iniciará automáticamente después de recibir el primer aliento del animal.

APAGADO AUTOMÁTICO: Después de desconectarse del animal, la alarma de respiración se detendrá durante 25 segundos y luego se apagará automáticamente después de 20 segundos de sonido de alarma.

BATERÍA DE LITIO RECARGABLE: El monitor adopta una batería de litio recargable de larga duración.

ATENCIÓN: El FC-Life debe usarse en animales intubados..



Incluye

- Unidad principal con pantalla LED 1.5 pulgadas
- Power Cord
- Un año de garantía



FUERTE CARE SAS

Carrera 31 No. 24-65
Palmira 76520
Colombia